



## NOTA INFORMATIVA

### Dispõe sobre a utilização de swabs de Rayon para a coleta de secreção nasofaríngea e orofaríngea para a investigação de Covid-19


A coleta de secreção da nasofaringe e orofaringe para a investigação de Covid-19 pode ser feita utilizando swabs de Rayon estéreis desde que observando as seguintes orientações:

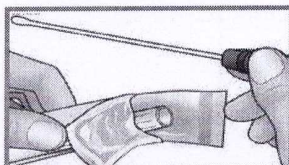


1. Retirar cada um dos 3 swabs dos seus tubetes

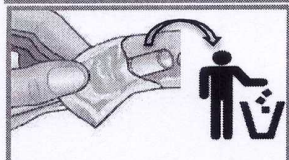


2. Descartar os tubetes

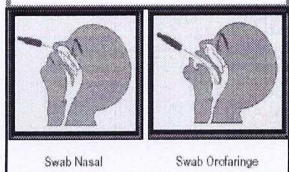


3. Proceder com a coleta utilizando os três swabs (2 para nasofaringe e 1 para orofaringe)

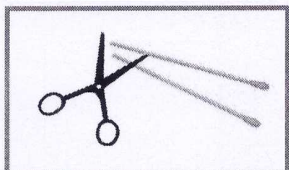

4. Inserir os 3 swabs imediatamente no tubo tipo falcon (contendo 3 ml de PBS) fornecido pelo Lacen-PB cortando o excesso dos cabos de maneira que estes possam caber totalmente dentro do tubo.

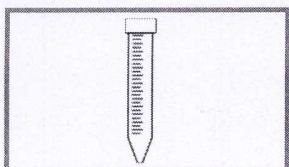


5. Não esquecer de verificar se os swabs estão completamente imersos na solução de PBS dentro do tubo falcon

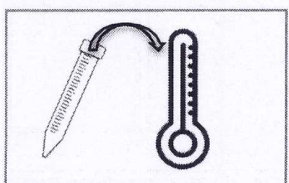


6. Fechar bem o tubo tipo falcon e acondicionar sob refrigeração (2 a 8°C) e encaminhar ao LACEN/PB no máximo em 24 horas com as fichas de notificação. Das 7:30h às 16:30h. Com plantão presencial nos finais de semana.

Atenciosamente

João Pessoa, 08 de abril de 2020

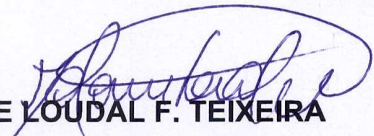  
**DALANE LOUDAL F. TEIXEIRA**  
Diretora Técnica do LACEN/PB

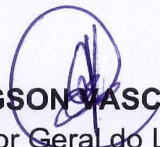  
**BERGSON VASCONCELOS**  
Diretor Geral do LACEN/PB