



NOTA TÉCNICA 006/2020


SUBSTITUIÇÃO DO TUBO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO SWAB APÓS COLETA DE AMOSTRA DE NASOFARINGE

O LACEN-PB comunica aos demais serviços de saúde do Estado da Paraíba, que a partir desta data estará fornecendo **Tubo sem meio de cultura estéril** em substituição ao tubo tipo *Falcon* para acondicionamento e transporte do swab após coleta de amostra de secreção de nasofaringe. Esta medida permanecerá em vigor até que o estoque de Tubos tipo *Falcon* seja restabelecido.

Como medida de segurança, por se tratar de um tubo com tampa sob pressão não rosqueada, orientamos manter os tubos na posição vertical para evitar extravasamento do líquido do seu interior com consequente inutilização da amostra.

Salientamos que a substituição é uma medida temporária e não acarreta prejuízo para conservação da amostra conforme orientado pelo Instituto Evandro Chagas (IEC) e testado pelo LACEN-PB.

Estão mantidas as orientações quanto ao procedimento de coleta, apenas houve a substituição do tipo de tubo de transporte e embalagem do swab:

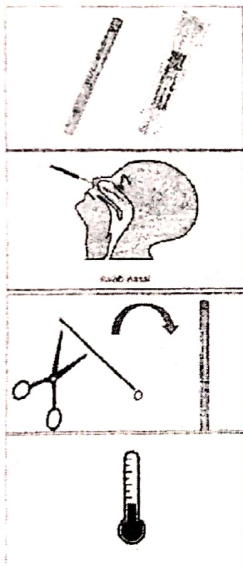

1. Conferir se o tubo contendo a solução PBS está bem tampado
2. Proceder com a coleta utilizando o mesmo *swab* para as duas narinas (não coletar da região da orofaringe)
3. Inserir o *swab* imediatamente no tubo com a solução PBS cortando o excesso da haste de maneira que possa caber
4. Fechar bem o tubo e acondicionar sob refrigeração (2° a 8 °C). Encaminhar ao LACEN-PB em no máximo 24 horas.

João Pessoa, 20 de junho de 2020.

Atenciosamente,

Thiago Franco de Oliveira Carneiro
Gerente de Biologia Molecular - LACEN-PB
Matrícula: 162.933-6

Bergson Vasconcelos
Diretor Geral - LACEN-PB
Matrícula: 101.834-5