

NOTA TÉCNICA 002/2020

RECEBIMENTO E ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS DE COVID-19 PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR – RT – PCR

- As amostras recebidas pelo LACEN/PB, devem chegar em caixas térmicas com gelox em temperaturas de 4°C a 8°C, período inferior a 24 horas.
- Devem estar identificadas pela unidade de origem com os seguintes dados, que devem estar de acordo com a ficha de notificação que acompanha a amostra.
 1. Nome completo do paciente
 2. Data e hora da coleta;
 3. Se o tubo contém 3 Swabs de Rayon e o líquido de transporte (3ml) PBS;
 4. Verificar os dados da ficha e o SINAN, principalmente:
 - 4.1 Nome do paciente;
 - 4.2 Data da coleta e dos primeiros sintomas;
 - 4.3 **Não deve ultrapassar 7 dias.**
 5. Observar alguma anotação especial do paciente (óbito ou paciente entubado)
 6. Não descartar nenhuma amostra recebida fora dos padrões, acondicionar no freezer a -70°C (colocar em caixa de Não Conformidades)
 7. Anotar os dados no livro do freezer a -70°C e na planilha.
 8. Colocar nas pastas as fichas triadas
 - 8.1 Fichas de COVID-19
 - 8.2 Pastas de pendências ou restrições de COVID-19
 9. Armazenar no freezer a -70°C
 - 9.1 Em caso de amostras irregulares, fazer a NÃO CONFORMIDADE em duas vias. Uma fica junto com a ficha de notificação do paciente nas pendências e outra entrega ao condutor que trouxe as amostras (não liberar o motorista antes de realizar toda triagem)
 - 9.2 Exemplos de NÃO CONFORMIDADE:
 - 9.2.1 Tubos sem identificação
 - 9.2.2 Identificação da amostra diferente da ficha de notificação
 - 9.2.3 Tubos sem swab ou líquido de transporte
 - 9.2.4 Tubos com dois swabs sem especificar que se trata de paciente entubado
 - 9.2.5 Coleta inadequada com 1 swab em cada tubo
 - 9.2.6 Ficha sem data de primeiros sintomas e/ou data da coleta e hora
 - 9.2.7 Amostra sem a devida quantidade de meio de transporte (que é de 3ml)
 - 9.2.8 Tempo de coleta superior a 7 dias, a partir dos primeiros sintomas (anotar na ficha a justificativa de coleta tardia).

João Pessoa-PB, 02 de Abril de 2020



DALANE LOUDAL F. TEIXEIRA
Diretora Técnica do LACEN/PB